



ROMET®
GENESIS

КЕРІВНИЦТВО З
ВИКОРИСТАННЯ
МОДЕЛЬ # R600

Цифрова технологія



Зареєстрована під
реєстраційним
номером Управління
з нагляду за якістю
харчових продуктів і
медикаментів США
(FDA): 3007615474.

- Уповноважений представник в ЄС
- Адреса сертифікованої компанії:
Альсштр. 97, 41063
Менхенгладбах,
Німеччина



Інтерактивний QR-код,
що регулярно
оновлюється


Розроблено і вироблено в США



ROMET®

GENESIS

Основні компоненти

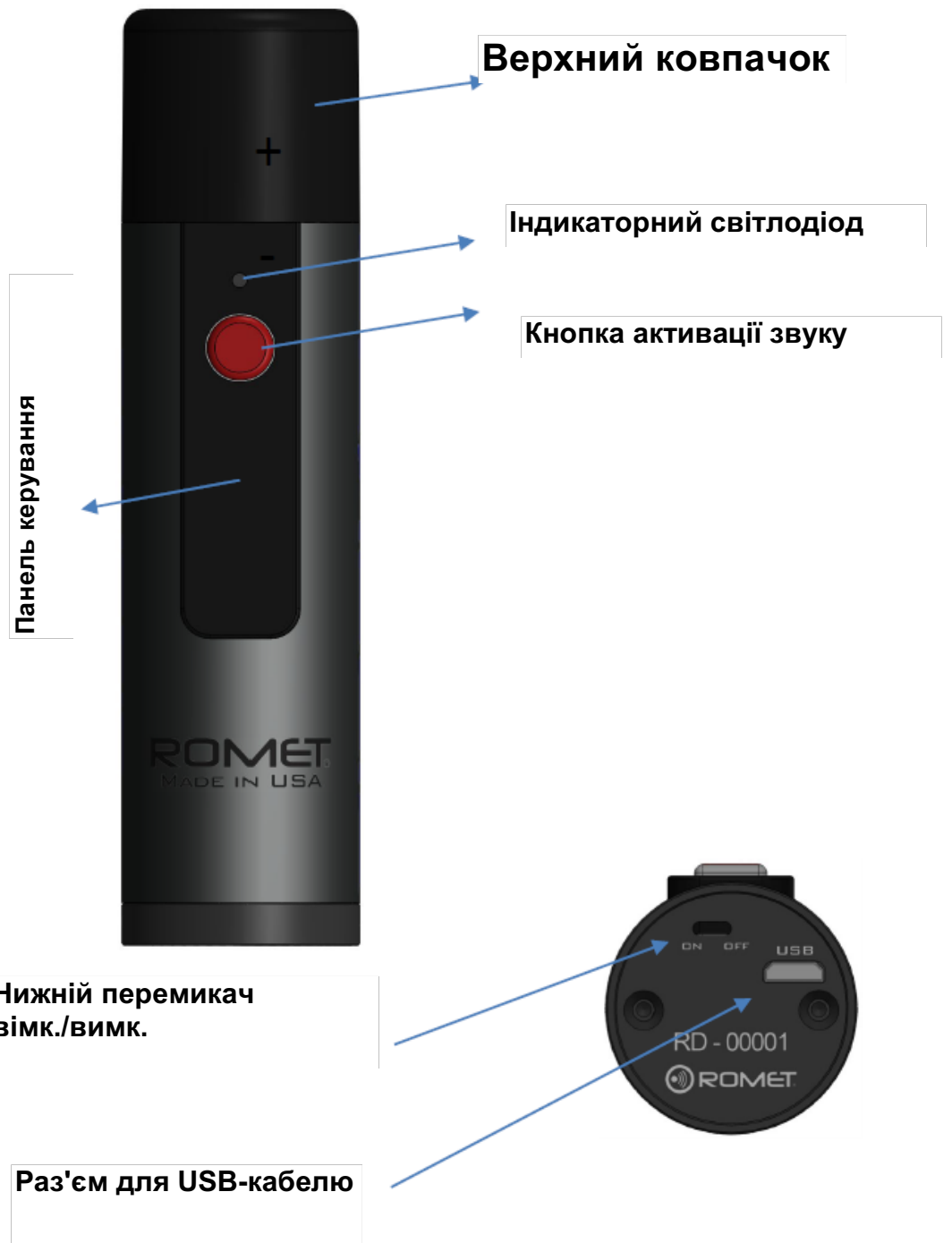

КОРОТКИЙ ОБЗОР

Що таке *Romet Genesis*?

Romet Genesis - це цифровий голосоутворювальний апарат. Він спеціально розроблений для відновлення голосової функції у людей, які перенесли ларингектомію. Його основною особливістю є кнопка регулювання рівнів звуку і висоти тону.

Romet Genesis відноситься до медичних виробів **КЛАСУ I**.

Основні принципи роботи всіх моделей голосоутворювальних апаратів, вироблених компанією «Fountain Head Marketing Inc.» в Сан-Антоніо, Техас США: Цифровий голосоутворювальний апарат формує механічні коливання з низькою звуковою частотою в межах від 60 до 195 Гц. Після прикладання до горла ці коливання створюють вібрацію в ротовій порожнині, аналогічну людському голосу.

Поєднання початку і кінця звукових коливань, а також ротової артикуляції створює доступну для сприйняття людську мову.

В коробці

- Голосоутворювальний апарат *Romet Genesis*;
- USB-кабель для зарядки;
- Міжнародний зарядний пристрій USB 5В 2 А; з перехідником на європейську вилку;
- Захисний шнур *Romet*;
- Керівництво користувача *Romet Genesis*;
- Гарантійний талон для *Romet Genesis* на 2 роки.

У коробці Ви знайдете все необхідне, щоб включити пристрій і почати говорити.

ПОЧАТОК РОБОТЫ

Базова експлуатація - акумулятор цього медичного виробу частково заряджається виробником. Щоб почати говорити, використовуйте перемикач, розташований в нижній частині виробу. Перемикач з положення **«ВИМК.»** в положення **«ВМК.»**. Після натискання на кнопку активації на панелі управління, якщо індикаторний світлодіод горить **ЗЕЛЕНИМ**, то акумулятор повністю заряджений; якщо він горить **ЧЕРВОНИМ**, заряд акумулятора **недостатній** або **НИЗЬКИЙ**. Зарядіть виріб якомога швидше. Див. Інструкції із зарядки акумулятора в пункті **11 (а)** цього Керівництва.

Після натискання на кнопку активації Ви можете почати говорити, слідуючи інструкціям, докладно описаними в цьому посібнику нижче.

Цифрова модель Genesis є економічною. Пацієнт не може регулювати звук або висоту тону.

Якщо Вам необхідний цифровий голосоутворювальний апарат із можливістю управління рівнем висоти тону / звука, ми рекомендуємо Вам модель R700 Clarity, яка дозволяє повністю управляти всіма параметрами.

Пошук найкращої точки

Найкращою точкою є місце, в якому Ви відчуваєте коливання, що передаються голосоутворювальним апаратом через тканини горла в порожнину Вашого рота найбільш чітко. Найпростіший спосіб знайти найкращу точку, полягає в тому, щоб розмістити голосоутворювальний пристрій в різних положеннях і відтворити звук, рухаючи Вашим ротом і використовуючи язик для виразного проголошення слів. Вам необхідно знайти місце на Вашому горлі, де звук передається найкраще. Під час пошуку найкращої точки намагайтеся, щоб видаваний Вами звук проходив через тканини горла і виходив із Вашої порожнини рота. Не поспішайте, підбираючи найкращу для Вас точку. Це найбільш важлива частина навчання використанню голосоутворювального апарату. Виявлення того самого відповідного місця направить Вас до успіху.

Перші слова

Після того, як Ви точно визначили «найкращу точку», Ви можете почати видавати деякі базові звуки. Спочатку сконцентруйтеся на окремих голосних. Тренуйтеся чітко вимовляти своїм ротом кожен звук, поки Вам не стане зручно вимовляти всі голосні. Після цього Ви можете перейти до простих слів. Поступово виробляйте Ваш спосіб говорити аж до речень і бесіди.

Очікування

Навчання говорити за допомогою голосоутворювального апарату - це непросто. Сприймайте його, як навчання грі на музичному інструменті. Воно потребує часу, тренування і терпіння. У деяких випадках чіткої розмови можна досягти за місяць, у інших - це займає всього кілька днів.

АКУМУЛЯТОР

Перевіряйте рівень заряду акумулятора після першого включення виробу. Якщо акумулятор заряджений досить, індикаторний світлодіод буде горіти **ЗЕЛЕНИМ**. Якщо рівень заряду **НИЗЬКИЙ**, індикаторний світлодіод загориться **ЧЕРВОНИМ**. Поки Ви говорите індикаторний світлодіод буде горіти відповідним кольором залежно від поточного рівня заряду акумулятора. Після підключення виробу із зарядним пристроєм **Червоний** індикаторний світлодіод на панелі почне «дихати» (повільно загорятися до повної яскравості, потім поступово згасати до повного загасання). Коли виріб повністю заряджений, індикаторний світлодіод на панелі стане **Незмінно Зеленим**. Виріб буде заряджатися незалежно від положення головного перемикача живлення. Примітка: під час зарядки виріб недоступний для роботи. Ця захисна міра призначена для захисту виробу від будь-яких пошкоджень.

Заряд акумулятора

Виріб необхідно зарядити, коли індикаторний світлодіод на панелі загориться червоним після натискання кнопки активації (це означає, що рівень заряду акумулятора нижче 100%). Коли кнопка активації звуку натиснута або коли після первинного включення виробу **індикаторний світлодіод блимає червоним** (це означає, що рівень заряду акумулятора **нижче 100%**), акумулятор слід зарядити перед тривалим процесом говоріння. Зарядка виконується за допомогою зарядного пристрою, який знаходиться в коробці. Вставте мікро-USB-кабель у комплекті в мікро-USB-порт, розташований в нижній частині виробу, потім вставте інший кінець кабелю з вилкою в розетку. Будьте обережні, вставляючи мікро-USB-кабель у порт, розташований в нижній частині виробу. Обережно вставте вилку мікро-USB-кабелю в розетку для активації функції зарядки. Не намагайтеся застосовувати силу, щоб вставити мікро-USB-кабель в порт. **Червоний індикаторний світлодіод** на панелі почне «дихати» (повільно загорятися до повної яскравості, потім поступово згасати до повного загасання). Коли виріб **повністю зарядиться, індикаторний світлодіод на панелі загориться зеленим і продовжить безперервно горіти**. Примітка: **під час зарядки виріб недоступний для роботи**. Ця захисна міра призначена для захисту виробу від будь-яких електричних пошкоджень. Виріб буде заряджатися незалежно від положення головного перемикача живлення.

Технічні характеристики

Загальні	
Регулювання висоти тону	Так
Регулювання звуку	Так
Діапазон частоти	70 - 165 Гц
Діапазон звуку	60-83 дБ
Голосові кнопки	2
Кнопка налаштувань	1
Час голосоутворення	До 30 годин
Час зарядки від 0 до 45%	60 хвилин із зарядним пристроєм Romet
Час зарядки від 0 до 100%	3 години 15 хвилин із зарядним пристроєм Romet
Конектор	MicroUSB
Зарядний пристрій USB	Характеристика заряду акумулятора 1.2
Споживана потужність	Макс. 5В, 1,5А

Фізичні	
Діаметр x довжина	Ø 32 x 123 мм
Вага	188 г
Матеріал корпусу	Високоякісна нержавіюча сталь із гальванічним покриттям
Матеріал верхнього ковпачка	АБС-пластик
Фізичні	
Ємність	3400 мАч
Тип акумулятора	3,7В, литий-іонний
Модель акумулятора	CustomPack
Виробник літій-іонного акумуляторного елемента	LG Chemical
Строк служби акумулятора	Більше 3 років
Захист	Smart electronics

ІНФОРМАЦІЯ

Попередження

- **Заборонено занурювати пристрій під воду.** Заборонено промивати пристрій під проточною водою. Існує потенційна можливість пошкодження пристрою.
- Заборонено розбирати пристрій при будь-яких обставинах. Це призведе до анулювання вашої гарантії.
- Заборонено використовувати зарядні пристрої та кабелі від сторонніх виробників. Використовуйте тільки оригінальні комплектуючі, що поставляються в коробці. Застосування будь-якого іншого зарядного обладнання може служити потенційною причиною пошкодження акумулятора або пристрою.
- Заборонено засовувати будь-які частини голосоутворювального апарату або будь-які комплектуючі в ротову порожнину.
- Уникайте фізичного пошкодження акумулятора.
- Уникайте короткого замикання акумуляторного елемента або акумулятора.
- Заборонено безладно зберігати елементи або акумулятори в кишені, сумці, коробці або ящику, де можливе їх коротке замикання між собою, або коротке замикання з проведеними матеріалами, наприклад, монетами і ключами.
- Пристрій містить сильний магніт, який може створювати перешкоди для серцевого ритму. Запитайте у свого лікаря перед використанням.

Будь ласка, зверніть увагу на те, що пристрій не призначений для використання декількома людьми, спільного використання та вторинного використання. Через контакт пристрою з горлом користувача, ротовою порожниною і іншими порожнинами - це обладнання було розроблене виключно для особистого використання!

Після того, як користувач завершив експлуатацію пристрою, він не повинен більше застосовуватися ніким іншим. Внаслідок цього факту передбачена гарантія, що надається Fountain Head Marketing Inc. не підлягає передачі.

14. Безпечне зберігання:

- Зберігайте в темному і сухому місці.
- Зберігайте пристрій і комплектуючі в оригінальній коробці.
- Температура зберігання від -20 ° C до + 45 ° C.

Гарантія

На всі вироби Romet надається гарантія терміном на 2 роки, починаючи з дати покупки. Гарантійний період для заміни голосоутворювального апарату або його частин триває протягом строку гарантії для оригінального голосоутворювального апарату.

Ця обмежена гарантія поширюється на будь-які дефекти матеріалу або якості виготовлення в умовах нормальної експлуатації при дотриманні інструкцій з експлуатації протягом гарантійного періоду. Спроба розібрати або ремонтувати виріб; вплив надмірного ударного навантаження (падіння, удар об інші об'єкти і т.д.); ушкодження внаслідок впливу рідин (занурення в воду або інші хімічні речовини) приведуть до анулювання вашої гарантії.

Під час гарантійного періоду Romet: будуть виконані ремонт або заміна виробу або його частин на безоплатній основі, дефект яких був внаслідок неналежної якості матеріалу або якості виготовлення в умовах нормальної експлуатації та технічного обслуговування. Ця обмежена гарантія не підлягає передачі.

Ця обмежена гарантія не поширюється на будь-які проблеми, викликані: станами, збоями в роботі або ушкодженнями, що виникли не внаслідок дефектів матеріалу і якості виготовлення.

- Стан, збої в роботі або ушкодження, що виникли внаслідок необережності, неналежного технічного обслуговування або конструкційної зміни.
- Пошкодження або знищення, викликані природними причинами, включаючи, зокрема блискавку, повінь або інші природні катаклізми - крадіжку або втрату голосоутворювального апарату.

Витрати з перевезення, а також ризик втрати або пошкодження під час передачі голосоутворювального апарату Romet несе покупець.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами гарантійного талона. Для отримання додаткової інформації про гарантії Romet, будь ласка, перейдіть на сторінку <http://www.romet.us>

У разі виникнення будь-яких проблем з Вашим пристроєм, зверніться до постачальника. info@romet.us

15. Інформація по утилізації для користувачів електричного та електронного обладнання:

Цей знак на коробці виробу та/або в супровідній документації означає, що електронне та електричне обладнання підлягає утилізації окремо від загальних побутових відходів. Для належної утилізації, відновлення та переробки, будь ласка, надішліть даний виріб (-и) у відповідний пункт збору, де воно буде прийнято безкоштовно. Також в деяких країнах ви можете повернути ваші вироби місцевому роздрібному реалізатору в разі придбання нового еквівалентного виробу. Належна утилізація цього пристрою допоможе зберегти цінні ресурси і запобігти можливим побічним ефектам для здоров'я людей і навколишнього середовища, які в іншому випадку можуть виникнути внаслідок неправильної утилізації відходів. Для отримання інформації про найближчий пункт збору, будь ласка, зверніться у ваші місцеві органи управління. Неправильна утилізація цих відходів може спричинити за собою штрафні санкції відповідно до вашого внутрішньодержавного законодавства.

Що стосується професійних користувачів в Європейському Союзі, будь ласка, для отримання інформації про утилізацію електричного та електронного устаткування, зверніться до свого постачальника або посередника.

Утилізація за межами країн Європейського Союзу: Цей знак дійсний тільки на території країн Європейського Союзу (ЄС). Для отримання інформації про правильні способи утилізації цього виробу, будь ласка, зверніться у ваші органи місцевого управління або до свого постачальника.



GENESIS

*Цифрова
технологія*



Контактні дані

Fountainhead Marketing Inc
Голосоутворювальний апарат Romet
14410 Саратога Пасседж,
м Сан-Антоніо, штат Техас, 78254
1960 США
email: info@romet.us
Тел .: 1.210.858.5189
Факс: 1.210.858.9608
Електронна-сторінка <http://www.romet.us>

Корпоративні керівники

- Том Додсон, президент, головний виконавчий директор
- Рут Додсон, віце-президент
- Кліфф Додсон, віце-президент, маркетинг
- Джеймс Консу, віце-президент, розробка / експлуатація
- Мартін Урругія, IT
- Маріта Брокветас, консультант із міжнародної торгівлі