



РУКОВОДСТВО ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
МОДЕЛЬ # R700

Цифровой голосообразующий аппарат
Усовершенствованная цифровая технология



Зарегистрирована под регистрационным номером Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA): 3007615474.

- Уполномоченный представитель в ЕС
- Адрес сертифицированной компании:
- Альсштр. 97,
- 41063
- Мёнхенгладбах,
- Германия



Интерактивный QR-код, который регулярно обновляется

Разработано и произведено в США

2. Детали и кнопки

Голособразующий аппарат Romet Clarity состоит из нескольких основных компонентов:



КРАТКИЙ ОБЗОР

Что такое Romet Clarity

Romet Clarity – это цифровой голосообразующий аппарат. Он специально разработан для восстановления голосовой функции у людей, которые перенесли ларингэктомию. Его основной особенностью является кнопка регулировки уровней звука и высоты тона.

*Romet Clarity относится к медицинским изделиям **КЛАССА I**.*

Основные принципы работы всех моделей голосообразующих аппаратов, произведенных компанией «Fountain Head Marketing Inc.» в Сан-Антонио, Техас США: Цифровой голосообразующий аппарат формирует механические колебания с низкой звуковой частотой в пределах от 60 до 195 Гц. После прикладывания к горлу эти колебания создают вибрацию в ротовой полости, аналогичную человеческому голосу.

Сочетание начала и конца звуковых колебаний, а также ротовой артикуляции создает доступную для восприятия человеческую речь.

В коробке

- *Голосообразующий аппарат Romet Clarity;*
- *USB-кабель для зарядки;*
- *Международное зарядное устройство USB 5В 2 А; с переходником на европейскую вилку;*
- *Защитный шнур Romet;*
- *Руководство пользователя Romet Clarity;*
- *Гарантийный талон для Romet Clarity на 2 года.*

В коробке Вы найдете все необходимое, чтобы включить устройство и начать говорить.

НАЧАЛО РАБОТЫ

3. Базовая эксплуатация

Изделие частично заряжается производителем. Необходимо полностью зарядить устройство перед началом эксплуатации. Зарядка устройства проводится, когда индикаторный светодиод на панели загорается красным после нажатия на кнопку активации звука. Зарядка выполняется посредством зарядного устройства, которое находится в коробке. Вставьте идущий в комплекте USB-кабель в USB-порт, расположенный в нижней части изделия, другой конец кабеля соедините с зарядным устройством, вставьте вилку зарядного устройства в электрическую розетку. Зеленый и красный индикаторные светодиоды, расположенные в нижней части изделия, загорятся. Когда красный индикаторный светодиод погаснет, устройство полностью заряжено. Примечание: во время зарядки изделие недоступно для работы. Данная защитная мера предназначена для защиты изделия от любых повреждений.

*4. После зарядки устройство **необходимо включить, чтобы использовать его.***

*Чтобы это сделать, используйте ползунковый переключатель **ВКЛ./ВЫКЛ.**, расположенный в нижней части изделия. Многоцветный индикаторный светодиод ненадолго загорится зеленым. Нажмите на кнопку активации звука, чтобы начать говорить и отрегулировать уровень звука по Вашему желанию.*

5. Поиск наилучшей точки

Наилучшей точкой является место, в котором Вы ощущаете колебания, передаваемые голосообразующим аппаратом через ткани горла в полость Вашего рта наиболее четко. Самый простой способ найти наилучшую точку, заключается в том, чтобы разместить голосообразующий аппарат у Вашего горла в различных положениях и воспроизвести звук, двигая Вашим ртом и используя язык для отчетливого произнесения слов. Вам необходимо найти место на Вашем горле, где звук передается лучше всего. Во время поиска наилучшей точки старайтесь, чтобы издаваемый Вами звук проходил через ткани горла и выходил из Вашей полости рта. Не торопитесь, подбирая наилучшую для Вас точку. Это наиболее важная часть обучения использованию голосообразующего аппарата. Обнаружение того самого подходящего места направит Вас к успеху.

6. Первые слова

После того, как Вы точно определили «наилучшую точку», Вы можете начать издавать некоторые базовые звуки. Сначала сконцентрируйтесь на отдельных гласных. Тренируйтесь четко произносить своим ртом каждый звук, пока Вам не станет удобно произносить все гласные. После этого Вы можете перейти к простым словам. Постепенно вырабатывайте Ваш способ говорить вплоть до предложений и беседы.

7. Ожидания

Обучение говорению с помощью голосообразующего аппарата – это непросто. Воспринимайте его, как обучение игре на музыкальном инструменте. Оно потребует времени, тренировки и терпения. В некоторых случаях четкого разговора можно достичь за месяц, у других – это занимает всего несколько дней.

НАСТРОЙКИ

8. Как изменить звук

Вы можете отрегулировать уровень звука по своему желанию. Просто закончите говорить и щелкайте по кнопкам (+) или (-), чтобы отрегулировать громкость звука. Когда вы достигнете максимальной или минимальной громкости, индикаторный светодиод загорится красным, указывая Вам на то, что это предельные уровни регулировки звука.

9. Как изменить высоту тона

Вы можете легко и просто отрегулировать высоту тона для кнопки активации звука.

Для этого следуйте процедуре, описанной ниже:

Нажмите одновременно и единократно на кнопку регулировки звука (-) и на круглую кнопку активации звука. Устройство начнет самостоятельно издавать звук. Теперь оно находится в «**Режиме настройки высоты тона**». Когда изделие издает звук, Вы можете отрегулировать высоту тона, нажимая на кнопки (+) или (-), чтобы повысить или понизить ее. После достижения желаемой высоты тона, нажмите на круглую кнопку активации. Это будет Вашей стандартной высотой тона всякий раз, когда Вы начинаете говорить.

АККУМУЛЯТОР

10. Проверка уровня заряда аккумулятора

Когда устройство включено, нажмите на кнопку активации, чтобы начать говорить. Загорится индикаторный светодиод.

ЗЕЛЕНЫЙ – Аккумулятор заряжен и готов к работе @ 100%)

КРАСНЫЙ – Уровень заряда аккумулятора ниже 25%. Индикаторный светодиод продолжит гореть красным цветом после нажатия любой кнопки, чтобы напомнить Вам зарядить устройство.

Если уровень заряда аккумулятора критически низкий, устройство перестанет образовывать звук, индикаторный светодиод будет мигать красным после нажатия любой кнопки голоса. Данная мера обеспечит защиту аккумулятора от повреждения и сохранит его в рабочем состоянии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется заряжать Ваше устройство, если индикаторный светодиод загорелся **КРАСНЫМ** цветом. Это позволит продлить срок службы аккумулятора, обеспечить достаточный уровень заряда и сохранить аккумулятор в рабочем состоянии.

Примечание: Если Вы обнаружили, что аккумулятор на Вашем устройстве не держит заряд в течение более чем одного часа эксплуатации, вероятно, срок службы встроенного аккумулятора подходит к концу. Если это случается в период гарантийного срока или после него, пожалуйста, обратитесь к Вашему местному поставщику или непосредственно в компанию «Romet» на страницах:

<http://www.romet.us> support@romet.us

11. Зарядка аккумулятора

Чтобы зарядить устройство, вставьте USB-кабель в комплекте в USB-порт, расположенный в нижней части устройства. Вставьте другой конец USB-кабеля в поставляемое зарядное устройство с USB-портом, вставьте вилку зарядного устройства в розетку. Обратите внимание на то, что изделие не работает во время процесса зарядки. Это предохранительная мера для защиты устройства от любых повреждений.

Уход за Вашим изделием Romet

Так как устройство находится в постоянном контакте с кожей и другими поверхностями, его очистку необходимо проводить не менее одного раза каждые 24 часа. Для поддержания оптимальной чистоты, следуйте описанной ниже процедуре:

1. Очистите наружные поверхности устройства слегка влажной мягкой тряпочкой из микрофибры.
2. После этого продезинфицируйте устройство, используя небольшое количество дезинфицирующего средства или спирта. Также можно использовать спиртовые салфетки.
3. Снова протрите поверхности устройства мягкой тряпочкой из микрофибры.

12. Контактные данные

Fountainhead Marketing Inc
Голосообразующий аппарат Romet
14410 Саратога Пасседж,
г. Сан-Антонио, штат Техас, 78254
1960 США
email: info@romet.us
Тел.: 1.210.858.5189
Факс: 1.210.858.9608
Электронная-страница <http://www.romet.us>

Технические характеристики

Общее:	
Регулировка высоты тона	Да
Регулировка звука	Да
Диапазон частоты	70 - 165 Гц
Диапазон звука	60-83 дБ
Голосовые кнопки	2
Кнопка настроек	1
Время голосообразования	До 30 часов
Время зарядки от 0 до 45%	60 минут с зарядным устройством Romet
Время зарядки от 0 до 100%	3 часа 15 минут с зарядным устройством Romet
Коннектор	MicroUSB
Зарядное устройство USB	Характеристик а заряда аккумулятора 1.2
Потребляемая мощность	Макс. 5В, 1,5А

Физические	
Диаметр x длина	Ø 32 x 123 мм
Вес	188 г
Материал корпуса	Высококачественная нержавеющая сталь с гальваническим покрытием
Материал верхнего колпачка	АБС-пластик
Физические	
Емкость	3400 мАч
Тип аккумулятора	3,7В, литий-ионный
Модель аккумулятора	CustomPack
Производитель литий-ионного аккумуляторного элемента	LG Chemical
Срок службы аккумулятора	Более 3 лет
Защита	Smart electronics

ИНФОРМАЦИЯ

13. Предупреждения

- **Запрещено погружать устройство под воду.** Запрещено промывать устройство под проточной водой. Существует потенциальная возможность повреждения устройства.
- Запрещено выполнять разборку устройства при любых обстоятельствах. Это приведет к необратимому аннулированию вашей гарантии.
- Запрещено использовать зарядные устройства и кабели от сторонних производителей. Используйте только оригинальные комплектующие, поставляемые в коробке. Применение любого другого зарядного оборудования может служить потенциальной причиной повреждения аккумулятора или устройства.
- Запрещено засовывать любые части голосовобразующего аппарата или любые комплектующие в ротовую полость.
- Избегайте сторания или физического повреждения аккумулятора.
- Избегайте короткого замыкания аккумуляторного элемента или аккумулятора.
- Запрещено беспорядочно хранить элементы или аккумуляторы в кармане, сумке, коробке или ящике, где возможно их короткое замыкание друг с другом, или короткое замыкание с проводимыми материалами, например, монетами и ключами.
- Устройство содержит сильный магнит, который может создавать помехи для сердечного ритма или других имплантируемых изделий. Проконсультируйтесь у своего врача перед использованием.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что устройство не предназначено для использования несколькими людьми, совместного использования и вторичного использования. Из-за контакта устройства с горлом пользователя, ротовой полостью и другими полостями – данное изделие **предназначено исключительно для личного использования!**

После того, как пользователь завершил эксплуатацию устройства, оно не должно больше применяться никем другим. Вследствие этого факта предусмотренная гарантия, предоставляемая Fountain Head Marketing Inc. не подлежит передаче.

14. Безопасное хранение:

- Храните в темном и сухом месте.
- Храните устройство и комплектующие в оригинальной коробке.
- Температура хранения от -20°C до +45°C.

Гарантия

На все изделия Romet предоставляется **гарантия сроком на 2 года**, начиная с даты покупки. Гарантийный период для замены голосообразующего аппарата или его частей длится в течение оставшегося срока гарантии для оригинального голосообразующего аппарата.

Данная ограниченная гарантия распространяется на любые дефекты материала или качества изготовления в условиях нормальной эксплуатации при соблюдении инструкций в Руководстве по эксплуатации в течении гарантийного периода. Попытка выполнить разборку или ремонт изделия; воздействие чрезмерной ударной нагрузки (падение, удар о другие объекты и т.д.); повреждение вследствие воздействия жидкостей (погружение в воду или другие химические вещества) приведут к аннулированию вашей гарантии.

Во время гарантийного периода Romet: будут выполнены ремонт или замена изделия или его частей на безвозмездной основе, дефект которых был вследствие ненадлежащего качества материала или качества изготовления в условиях нормальной эксплуатации и технического обслуживания. Данная ограниченная гарантия не подлежит передаче.

Данная ограниченная гарантия не распространяется на любые проблемы, вызванные: состояниями, сбоями в работе или повреждениями, возникшими не вследствие дефектов материала и качества изготовления.

- Состояниями, сбоями в работе или повреждениями, возникшими вследствие неосторожности, ненадлежащего технического обслуживания или конструкционного изменения.
- Повреждения или уничтожения, вызванного естественными причинами, включая, в частности молнию, наводнение или другие природные катаклизмы – кражу или утерю голосообразующего аппарата.

Расходы по перевозке, а также риск утери или повреждения во время передачи голосообразующего аппарата Romet несет покупатель.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями гарантийного талона. Для получения дополнительной информации о гарантии Romet, пожалуйста, перейдите на страницу <http://www.romet.us>

В случае возникновения любых проблем с Вашим устройством, обратитесь к поставщику. info@romet.us

25. Информация по утилизации для пользователей электрического и электронного оборудования:

Данный знак на коробке изделия и/или в сопроводительной документации означает, электронное и электрическое оборудование подлежит утилизации отдельно от общих бытовых отходов. Для надлежащей утилизации, восстановления и переработки, пожалуйста, отправьте данное изделие (-я) в соответствующий пункт сбора, где оно будет принято бесплатно. Также в некоторых странах вы можете вернуть ваши изделия местному розничному реализатору в случае приобретения нового эквивалентного изделия. Надлежащая утилизация данного изделия поможет сохранить ценные ресурсы и предотвратить возможные неблагоприятные воздействия на здоровье людей и окружающую среду, которые в противном случае могут возникнуть вследствие неправильной утилизации отходов. Для получения информации о ближайшем пункте сбора, пожалуйста, обратитесь в ваши местные органы управления. Неправильная утилизация данных отходов может повлечь за собой штрафные санкции в соответствии с вашим внутригосударственным законодательством.

Что касается профессиональных пользователей в Европейском Союзе, пожалуйста, для получения информации об утилизации электрического и электронного оборудования, обратитесь к вашему поставщику или посреднику.

Утилизация за пределами стран Европейского Союза: Данный знак действителен только на территории стран Европейского Союза (ЕС). Для получения информации о правильном способе утилизации данного изделия, пожалуйста, обратитесь в ваши органы местного управления или к вашему поставщику.



ROMET®

CLARITY

*Усовершенствованная
цифровая технология*