



КЕРІВНИЦТВО З
ВИКОРИСТАННЯ
МОДЕЛЬ # R700

Цифровий голосоутворювальний апарат
Вдосконалена цифрова технологія



Зареєстрована під
реєстраційним номером
Управління з нагляду за
якістю харчових
продуктів і
медикаментів США
(FDA): 3007615474.

- Уповноважений представник в ЄС
- Адреса сертифікованої компанії:
Альсштр. 97, 41063
Менхенгладбах,
Німеччина



Інтерактивний QR-код,
що регулярно
оновлюється

Розроблено і вироблено в США

2. Деталі та кнопки

Голосоутворювальний апарат Romet Clarity складається з декількох основних елементів:



КОРОТКИЙ ОБЗОР

Що таке Romet Clarity

Romet Clarity - це цифровий голосоутворювальний апарат. Він спеціально розроблений для відновлення голосової функції у людей, які перенесли ларингектомію. Його основною особливістю є кнопка регулювання рівнів звуку і висоти тону.

*Romet Clarity відноситься до медичних виробів **КЛАСУ I**.*

Основні принципи роботи всіх моделей голосоутворювальних апаратів, вироблених компанією «Fountain Head Marketing Inc.» в Сан-Антоніо, Техас США: Цифровий голосоутворювальний апарат формує механічні коливання з низькою звуковою частотою в межах від 60 до 195 Гц. Після прикладання до горла ці коливання створюють вібрацію в ротовій порожнині, аналогічну людському голосу.

Поєднання початку і кінця звукових коливань, а також ротової артикуляції створює доступну для сприйняття людську мову.

В коробці

- Голосоутворювальний апарат Romet Clarity;
- USB-кабель для зарядки;
- Міжнародний зарядний пристрій USB 5В 2 А; з перехідником на європейську вилку;
- Захисний шнур Romet;
- Керівництво користувача Romet Clarity;
- Гарантійний талон для Romet Clarity на 2 роки.

У коробці Ви знайдете все необхідне, щоб включити пристрій і почати говорити.

ПОЧАТОК РОБОТИ

3. Базова експлуатація

Виріб частково заряджається виробником. Необхідно повністю зарядити пристрій перед початком експлуатації. Зарядка пристрою проводиться, коли індикаторний світлодіод на панелі загоряється червоним після натискання на кнопку активації звуку. Зарядка виконується за допомогою зарядного пристрою, який знаходиться в коробці. Вставте USB-кабель в USB-порт, розташований в нижній частині виробу, а інший кінець з'єднайте із зарядним пристроєм, вставте вилку зарядного пристрою в електричну розетку. Зелений і червоний індикаторні світлодіоди, розташовані в нижній частині виробу, загоряються. Коли червоний індикаторний світлодіод згасне, пристрій повністю заряджений. Примітка: під час зарядки виріб недоступний для роботи. Ця захисна міра призначена для захисту виробу від будь-яких пошкоджень

4. Після зарядки пристрій **необхідно включити, щоб використовувати його.**

Щоб це зробити, використовуйте перемикач **ВІМК./ВИМК.**, що розташований в нижній частині виробу. Багатобарвний індикаторний світлодіод засвітиться на короткий проміжок зеленим. Натисніть на кнопку активації звуку, щоб почати говорити і відрегулювати рівень звуку за Вашим бажанням.

5. Пошук найкращої точки

Найкращою точкою є місце, в якому Ви відчуваєте коливання, що передаються голосоутворювальним апаратом через тканини горла в порожнину Вашого рота найбільш чітко. Найпростіший спосіб знайти найкращу точку, полягає в тому, щоб розмістити голосоутворювальний пристрій в різних положеннях і відтворити звук, рухаючи Вашим ротом і використовуючи язик для виразного проголошення слів. Вам необхідно знайти місце на Вашому горлі, де звук передається найкраще. Під час пошуку найкращої точки намагайтеся, щоб видаваний Вами звук проходив через тканини горла і виходив із Вашої порожнини рота. Не поспішайте, підбираючи найкращу для Вас точку. Це найбільш важлива частина навчання використанню голосоутворювального апарату. Виявлення того самого відповідного місця направить Вас до успіху.

6. Перші слова

Після того, як Ви точно визначили «найкращу точку», Ви можете почати видавати деякі базові звуки. Спочатку сконцентруйтеся на окремих голосних. Тренуйтеся чітко вимовляти своїм ротом кожен звук, поки Вам не стане зручно вимовляти всі голосні. Після цього Ви можете перейти до простих слів. Поступово виробляйте Ваш спосіб говорити аж до речень і бесіди.

7. Очікування

Навчання говорити за допомогою голосоутворювального апарату - це непросто. Сприймайте його, як навчання грі на музичному інструменті. Воно потребує часу, тренування і терпіння. У деяких випадках чіткої розмови можна досягти за місяць, у інших - це займає всього кілька днів.

НАЛАШТУВАННЯ

8. Як змінити звук

Ви можете відрегулювати рівень звуку за своїм бажанням. Просто Ви говорите і клацайте по кнопках (+) або (-), щоб відрегулювати гучність звуку. Коли ви досягнете максимальної або мінімальної гучності, індикаторний світлодіод загориться червоним, вказуючи Вам на те, що це крайні рівні регулювання звуку.

9. Как змінити висоту тона

Ви можете легко і просто відрегулювати висоту тону для кнопки активації звуку. Для цього дотримуйтесь процедури, описаної нижче:

Натисніть одночасно і одноразово на кнопку регулювання звуку (-) і на круглу кнопку активації звуку. Пристрій почне самотійно видавати звук. Тепер воно знаходиться в меню «**Режим налаштування висоти тону**». Коли виріб видає звук, Ви можете відрегулювати висоту тону, натискаючи на кнопки (+) або (-), щоб підвищити або знизити її. Після досягнення бажаної висоти тону, натисніть на круглу кнопку активації. Це буде Вашою стандартною висотою тону щоразу, коли Ви починаєте говорити.

АКУМУЛЯТОР

10. Перевірка рівня заряду акумулятора

Коли пристрій увімкнено, натисніть на кнопку активації, щоб почати говорити. Загориться індикаторний світлодіод.

ЗЕЛЕНИЙ - Акумулятор заряджений і готовий до роботи на 100%)

ЧЕРВОНИЙ - Рівень заряду акумулятора нижче 25%. Індикаторний світлодіод продовжить горіти червоним кольором після натискання будь-якої кнопки, щоб нагадати Вам зарядити пристрій.

Якщо рівень заряду акумулятора критично низький, пристрій перестане утворювати звук, індикаторний світлодіод буде блимати червоним після натискання будь-якої кнопки голосу. Ця міра забезпечить захист акумулятора від пошкодження і збереже його в робочому стані.

ПРИМІТКА: Рекомендується заряджати Ваш пристрій, якщо індикаторний світлодіод загорівся **ЧЕРВОНИМ** кольором. Це дозволить продовжити термін служби акумулятора, забезпечити достатній рівень заряду і зберегти акумулятор в робочому стані.

Примітка: Якщо Ви виявили, що акумулятор на своєму пристрої не тримає заряд протягом більш ніж однієї години експлуатації, ймовірно, термін служби вбудованого акумулятора добігає кінця. Якщо це трапляється в період гарантійного терміну або після нього, будь ласка, зверніться до Вашого місцевого постачальника або безпосередньо в компанію «Romet» на сторінках:

<http://www.romet.us> support@romet.us

11. Зарядка акумулятора

Щоб зарядити пристрій вставте USB-кабель в комплекті в USB-порт, розташований в нижній частині пристрою. Вставте інший кінець USB-кабелю в зарядний пристрій з USB-портом, вставте вилку зарядного пристрою в розетку. Зверніть увагу на те, що виріб не працює під час процесу зарядки. Це запобіжний захід для захисту пристрою від будь-яких пошкоджень.

Догляд за Вашим виробом Romet

Так як пристрій знаходиться в постійному контакті зі шкірою і іншими поверхнями, його очищення необхідно проводити не менше одного разу кожні 24 години. Для підтримки оптимальної чистоти, дотримуйтесь описаної нижче процедури:

1. Очистіть зовнішні поверхні пристрою злегка вологою м'якою ганчіркою з мікрофібри.
2. Після цього продезінфікуйте пристрій, використовуючи невелику кількість дезінфікуючого засобу або спирту. Також можна використовувати спиртові серветки.
3. Знову протріть поверхні пристрою м'якою ганчіркою з мікрофібри.

12. Контактні дані

Fountainhead Marketing Inc
Голосоутворювальний апарат Romet
14410 Саратога Пасседж,
м Сан-Антоніо, штат Техас, 78254
1960 США
email: info@romet.us
Тел .: 1.210.858.5189
Факс: 1.210.858.9608
Електронна-сторінка <http://www.romet.us>

Технічні характеристики

Загальні	
Регулювання висоти тону	Так
Регулювання звуку	Так
Діапазон частоти	70 - 165 Гц
Діапазон звуку	60-83 дБ
Голосові кнопки	2
Кнопка налаштувань	1
Час голосоутворення	До 30 годин
Час зарядки від 0 до 45%	60 хвилин із зарядним пристроєм Romet
Час зарядки від 0 до 100%	3 години 15 хвилин із зарядним пристроєм Romet
Конектор	MicroUSB
Зарядний пристрій USB	Характеристика заряду акумулятора 1.2
Споживана потужність	Макс. 5В, 1,5А

Фізичні	
Діаметр x довжина	Ø 32 x 123 мм
Вага	188 г
Матеріал корпусу	Високоякісна нержавіюча сталь із гальванічним покриттям
Матеріал верхнього ковпачка	АБС-пластик
Фізичні	
Ємність	3400 мАч
Тип акумулятора	3,7В, литий-іонний
Модель акумулятора	CustomPack
Виробник літій-іонного акумуляторного елемента	LG Chemical
Строк служби акумулятора	Більше 3 років
Захист	Smart electronics

ІНФОРМАЦІЯ

13. Попередження

- **Заборонено занурювати пристрій під воду.** Заборонено промивати пристрій під проточною водою. Існує потенційна можливість пошкодження пристрою.
- Заборонено розбирати пристрій при будь-яких обставинах. Це призведе до анулювання вашої гарантії.
- Заборонено використовувати зарядні пристрої та кабелі від сторонніх виробників. Використовуйте тільки оригінальні комплектуючі, що поставляються в коробці. Застосування будь-якого іншого зарядного обладнання може служити потенційною причиною пошкодження акумулятора або пристрою.
- Заборонено засовувати будь-які частини голосоутворювального апарату або будь-які комплектуючі в ротову порожнину.
- Уникайте фізичного пошкодження акумулятора.
- Уникайте короткого замикання акумуляторного елемента або акумулятора.
- Заборонено безладно зберігати елементи або акумулятори в кишені, сумці, коробці або ящику, де можливе їх коротке замикання між собою, або коротке замикання з проведеними матеріалами, наприклад, монетами і ключами.
- Пристрій містить сильний магніт, який може створювати перешкоди для серцевого ритму. Запитайте у свого лікаря перед використанням.

Будь ласка, зверніть увагу на те, що пристрій не призначений для використання декількома людьми, спільного використання та вторинного використання. Через контакт пристрою з горлом користувача, ротовою порожниною і іншими порожнинами - це обладнання було розроблене виключно для особистого використання!

Після того, як користувач завершив експлуатацію пристрою, він не повинен більше застосовуватися ніким іншим. Внаслідок цього факту передбачена гарантія, що надається Fountain Head Marketing Inc. не підлягає передачі.

14. Безпечне зберігання:

- Зберігайте в темному і сухому місці.
- Зберігайте пристрій і комплектуючі в оригінальній коробці.
- Температура зберігання від -20 ° C до + 45 ° C.

Гарантія

На всі вироби Romet надається гарантія терміном на 2 роки, починаючи з дати покупки. Гарантійний період для заміни голосоутворювального апарату або його частин триває протягом строку гарантії для оригінального голосоутворювального апарату.

Ця обмежена гарантія поширюється на будь-які дефекти матеріалу або якості виготовлення в умовах нормальної експлуатації при дотриманні інструкцій з експлуатації протягом гарантійного періоду. Спроба розібрати або ремонтувати виріб; вплив надмірного ударного навантаження (падіння, удар об інші об'єкти і т.д.); ушкодження внаслідок впливу рідин (занурення в воду або інші хімічні речовини) приведуть до анулювання вашої гарантії.

Під час гарантійного періоду Romet: будуть виконані ремонт або заміна виробу або його частин на безоплатній основі, дефект яких був внаслідок неналежної якості матеріалу або якості виготовлення в умовах нормальної експлуатації та технічного обслуговування. Ця обмежена гарантія не підлягає передачі.

Ця обмежена гарантія не поширюється на будь-які проблеми, викликані: станами, збоями в роботі або ушкодженнями, що виникли не внаслідок дефектів матеріалу і якості виготовлення.

- Стан, збої в роботі або ушкодження, що виникли внаслідок необережності, неналежного технічного обслуговування або конструкційної зміни.
- Пошкодження або знищення, викликані природними причинами, включаючи, зокрема блискавку, повінь або інші природні катаклізми - крадіжку або втрату голосоутворювального апарату.

Витрати з перевезення, а також ризик втрати або пошкодження під час передачі голосоутворювального апарату Romet несе покупець.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами гарантійного талона. Для отримання додаткової інформації про гарантії Romet, будь ласка, перейдіть на сторінку <http://www.romet.us>

У разі виникнення будь-яких проблем з Вашим пристроєм, зверніться до постачальника. info@romet.us

15. Інформація по утилізації для користувачів електричного та електронного обладнання:

Цей знак на коробці виробу та/або в супровідній документації означає, що електронне та електричне обладнання підлягає утилізації окремо від загальних побутових відходів. Для належної утилізації, відновлення та переробки, будь ласка, надішліть даний виріб (-и) у відповідний пункт збору, де воно буде прийнято безкоштовно. Також в деяких країнах ви можете повернути ваші вироби місцевому роздрібному реалізатору в разі придбання нового еквівалентного виробу. Належна утилізація цього пристрою допоможе зберегти цінні ресурси і запобігти можливим побічним ефектам для здоров'я людей і навколишнього середовища, які в іншому випадку можуть виникнути внаслідок неправильної утилізації відходів. Для отримання інформації про найближчий пункт збору, будь ласка, зверніться у ваші місцеві органи управління. Неправильна утилізація цих відходів може спричинити за собою штрафні санкції відповідно до вашого внутрішньодержавного законодавства.

Що стосується професійних користувачів в Європейському Союзі, будь ласка, для отримання інформації про утилізацію електричного та електронного устаткування, зверніться до свого постачальника або посередника.

Утилізація за межами країн Європейського Союзу: Цей знак дійсний тільки на території країн Європейського Союзу (ЄС). Для отримання інформації про правильні способи утилізації цього виробу, будь ласка, зверніться у ваші органи місцевого управління або до свого постачальника.



*Вдосконалена цифрова
технологія*